

EXAMEN	Tube	Recommandations
Méthémoglobine	●	Acheminer rapidement
Mononucléose (EBV)	●	
N NFS – Plaquettes	●	
NSE	●	❄ Congeler < 1h
O Estradiol	●	Indiquer la DDR
Opiacés	Urines	Recueil au laboratoire
Orosomucoïde	●	
P Paludisme (goutte épaisse)	●x2	Prélever 2 tubes, examen d'urgence, contacter le laboratoire
Parathormone (PTH)	●	Centrifuger < 7h
Parvovirus	●	
Phadiatop	●	
Phénobarbital (Gardénal)	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
Phosphatase alcaline (PAL)	●	
Phosphore	●	A jeun de préférence
Pneumallergènes	●	
Potassium	●	
Préalbumine	●	
Procalcitonine (PCT)	●	
Prolactine	●	Prélever après 20 minutes de repos
Progestérone	●	Indiquer la DDR
Protéine C, Protéine S	●x2	❄ Congeler < 4h
Protéines, Protides (PTX)	●	
Protidogramme (électrophorèse des protéines)	●	1 tube sec spécifiquement pour cette analyse
PSA, PSA libre	●	
PTH (PTH 1-84)	●	Centrifuger < 7h
R RAI *	●	Obligatoire sur le tube : Nom+Nom de naissance+Prénom+Date de naissance
Vérification obligatoire de l'identité sur document officiel		
Réserve Alcaline (CO2)	●	
Réticulocytes	●	
Rh foetal	●x2	du lundi au jeudi fournir la carte de groupe de la mère et le consentement signé
Rubéole	●	
S Sodium	●	
Somatomédine (Ig F1)	●	❄ Congeler < 4h
Syphilis (BW, TPHA, VDRL)	●	

EXAMEN	Tube	Recommandations
SDHA (SDHEA)	●	
T Tacrolimus (Prograf, FK506)	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
Testostérone	●	
Thyroglobuline	●	
Toxoplasmose	●	
TP, INR, TCA, TCK	●	
Transaminases (TGO, TGP, ASAT, ALAT)	●	
Transferrine	●	A jeun de préférence
Triglycérides (TG, trig)	●	A jeun de 10h à 12h
Trisomie 21	●	Consentement signé obligatoire, compte rendu 1 ^{ère} écho Domicile déconseillé
Trophallergènes	●	
Trophatop	●	
Troponine	●	
TSH, T3, T4	●	
U Urée (urémie)	●	
V Varicelle-Zona	●	HN selon le contexte
Vitamine A Vitamine E	●	❄ Congeler < 1h A l'abri de la lumière Domicile déconseillé
Vitamine B1	●	❄ Congeler < 4h A l'abri de la lumière HN
Vitamine B6	●	❄ Congeler < 4h A l'abri de la lumière
Vitamine C	●	❄ Congeler < 20 mn A l'abri de la lumière Domicile déconseillé HN
Vitamine B9 (Folates)	●	A jeun de préférence
Vitamine B12	●	A jeun de préférence
Vitamine D (25 OH vitD3)	●	
VS	●	
W Waaler-Rose (Facteurs rhumatoïdes)	●	
Z Zinc érythrocytaire	●	Tube hépariné sans gel HN
Zinc sérique	●	A déposer rapidement

GIC = glycémie+iono+créat
IUC = iono+urée+créat
ALIP = EAL = Bilan lipidique
HOMA = insuline+glycémie
BHC=Bilan hépatique complet

Mémento Préleveur

T-PRA-SEL-PREL-M003-V05

(Diffusion externe non contrôlée, version électronique faisant foi)



Lien web



Lien Android




Lien Apple Store



Merci de contacter le laboratoire pour toutes analyses ne figurant pas dans ce guide

Ordre de prélèvements sanguins :

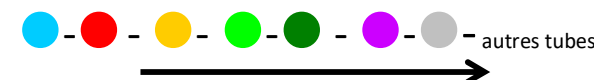

Homogénéisation des tubes :

Après le prélèvement, pensez à **homogénéiser les tubes par quelques retournements.**

Groupe sanguin / RAI / Coombs :

NOTER impérativement et manuscritement sur le Tube :

► **Patient :** Nom, nom de naissance, prénom, date de naissance

► **Préleveur :** identité, date et heure du prélèvement (ou sur le bon de prélèvement).

L'utilisation des étiquettes pré identifiées est tolérée si sont notés manuscritement la date du prélèvement et les initiales du préleveur

***Vérification obligatoire de l'identité sur document officiel avec photo (CNI, passeport, carte de séjour, nouveau permis de conduire format carte bancaire)**

LEGENDE :

● Tube citraté	● Tube aprotinine
● Tube sec sans gel	● Tube héparinate de Na
● Tube sec avec gel	❄ Congeler
● Tube hépariné avec gel	DDR : date dernières règles
● Tube héparine Li sans gel	HN : Hors Nomenclature, nous consulter pour connaître le tarif
● Tube EDTA	
● Tube fluoré	
Analyses nécessitant un 2 ^{ème} tube sec	

	EXAMEN	Tube	Recommandations
A	AAN (Ac anti-nucléaires)	●	
	ACC (DRVV, Anticorps type lupique)	● x2	❄ Congeler < 4h
	ACE	●	
	Acide folique (Vitamine B9)	●	
	Acide urique (uricémie)	●	
	ACTH	●	tube aprotinine ❄ Congeler < 4h
	AFP	●	
	Agglutinines irrégulières (RAI) *Vérification obligatoire de l'identité sur document officiel	●	Obligatoire sur le tube : Nom+Nom de naissance+Prénom+Date de naissance
	Albumine sérique	●	
	Alcool (Ethanol)	●	Pas de désinfection à l'alcool
	Alpha 1-antitrypsine	●	
	AMH	●	
	Ammoniémie	●	Domicile impossible
	Amylase	●	A jeun de préférence
	Anticorps anti-CCP (peptides citrulinés)	●	
	Anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK)	●	
	Anticorps anti-thyroïdiens (ATPO, ATG)	●	
	Antithrombine (AT3)	● x2	❄ Congeler < 4h
	Anti-Xa (Héparinémie)	●	❄ Congeler < 1h Contactez le laboratoire
	ASDOR, ASLO (ac strepto)	●	
B	β2 microglobuline	●	
	βHCG	●	Indiquer la DDR
	Bicarbonate (RA, CO2)	●	
	Bilirubine totale et conjuguée	●	
	BNP (NT pro BNP)	●	
	Borrélie (Lyme)	●	
	BW (syphilis, TPHA, VDRL)	●	
C	Calcium	●	A jeun de préférence
	Calcium ionisé	●	❄ Congeler < 1h un tube spécifique pour cette analyse HN
	Calcitonine	●	❄ Congeler < 4h
	Cannabis sanguin	●	
	Cannabis urinaire	Urines	Recueil au laboratoire

	EXAMEN	Tube	Recommandations
	Carbamazépine (Tégréto)	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
	CA 125	●	
	CA 15.3	●	
	CA 19.9	●	
	CCP (peptides citrulinés)	●	
	CDT	●	HN si bilan préfecture
	Chlamydiae (sérologie)	●	Ne pas confondre avec la recherche par PCR
	Cholesterol total, HDL, LDL(Bilan lipidique)	●	A jeun de 10 à 12h
	Ciclosporine	●	Préciser résiduelle ou 2h après la prise Posologie+date et heure de la dernière prise
	CMV	●	
	Cocaïne	Urines	Recueil au laboratoire
	Coefficient de saturation du fer	●	
	Cortisol	●	Prélever le matin avant 10h
	Complément C3, C4	●	
	Complément CH50	●	❄ Congeler < 1h
D	Coombs direct	●	Obligatoire sur le tube : Nom+Nom de naissance+Prénom+Date de naissance
	CPK	●	
	Créatinine (DFG, MDR, Cockcroft, CKD-EPI)	●	Poids
	CRP	●	
	Cuivre (cuprémie)	●	A déposer rapidement
	CYFRA 21-1	●	
	D-DIMERES	●	
	Dépakine	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
	Digoxine	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
	DRVV (ACC)	● x2	❄ Congeler < 4h
E	EBV (MNI,VCA,EBNA, mononucléose)	●	
	ECT (SSa, SSb, ENA...)	●	
	Electrophorèse hémoglobine	● x2	Prélever du lundi au jeudi
	Electrophorèse des protéines (EPP,EPS,Protidogramme, Protéinogramme)	●	1 tube sec spécifiquement pour cette analyse
F	Facteurs de coagulation	●	❄ Congeler < 4h si plusieurs facteurs prélever jusqu'à 3 tubes

	EXAMEN	Tube	Recommandations
	Facteurs rhumatoïdes (latex,Waaler Rose)	●	
	Fer	●	A jeun de préférence
	Ferritine	●	
	Fibrinogène	●	
	Folates (vitamine B9)	●	A jeun de préférence
	FSH	●	Indiquer la DDR
G	Glycémie	●	A jeun de 12h sauf urgence
	GGT	●	
	GH (hormone de croissance)	●	À jeun ❄ Congeler < 4h
	GRH – PHENO – RAI * Vérification obligatoire de l'identité sur document officiel	● 1 tube distinct	Obligatoire sur le tube : Nom+Nom de naissance+ Prénom+Date de naissance
H	Haptoglobine	●	
	HbA1c	●	
	Hépatites A, B, C, E	●	
	Herpes	●	HN selon le contexte
	HIV	●	
	HOMA (Insuline+glycémie)	● + ●	
	HLA B27	●	HN Consentement patient
I	IgE totales	●	
	IgE spécifiques	●	
	IgF-1 (somatomédine C)	●	❄ Congeler < 4h
	IGG-IGA-IGM (dosage pondéral des immunoglobulines)	●	
	Immunofixation (immunoélectrophorèse)	●	1 tube sec spécifiquement pour cette analyse
	Inhibine B	●	❄ Congeler < 4h
	Insuline	●	
L	Iono complet(Na,K,Cl,RA,Prot)	●	
	Lactates (acide lactique)	●	A déposer rapidement au laboratoire
	Latex – Waler Rose (WR)	●	
	LDH	●	
	LH	●	Indiquer la DDR
	Lipase	●	
	Lithium	●	Posologie+date et heure de la dernière prise
	Lyme (Borrélie)	●	
	Lymphocytes CD3-CD4-CD8	● x2	Prélever du lundi au vendredi matin
M	Magnésium sérique	●	A jeun de préférence
	Magnésium érythrocytaire	●	Tube hépariné sans gel